

# COVID-19

## Souprava pro detekci protilátek IgG/IgM

Koloidní zlato




ALKOHOLOVÝ  
TAMPON



KREVNÍ  
LANCETA



PIPETA

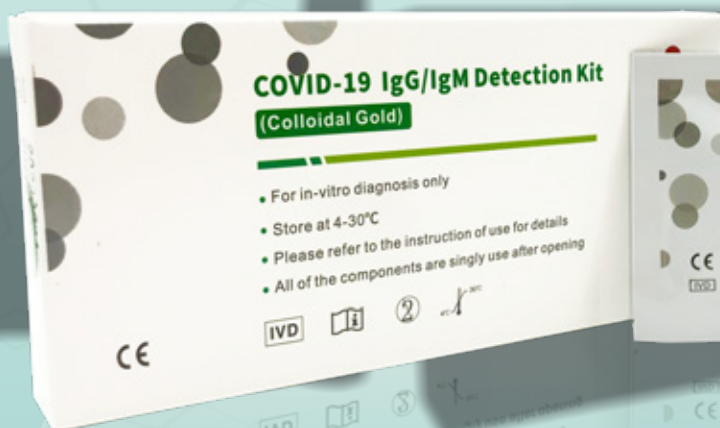

HOREČKA



KAŠEL



DUŠNOST



Rychlý výsledek  
během 10-15 minut



Snadné ovládní,  
bez potřeby strojů




Jeden test v krabici,  
jednoduché použití



## Co je COVID-19?

Nové koronaviry patří do rodu  $\beta$ . COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. Lidé jsou k němu obecně náchylní. V současné době jsou hlavním zdrojem infekce pacienti infikovaní novým koronavirem, nakažliví mohou být také asymptomatictí infikovaní lidé. Na základě současného epidemiologického šetření je inkubační doba 1 až 14 dní, většinou 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý kašel. V několika případech se vyskytl ucpaný nos, rýma, bolest v krku, myalgie a průjem

## Výhody detekce IgG / IgM COVID-19

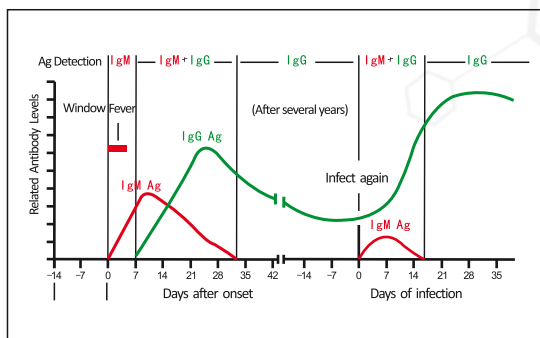

- Po infekci lidského těla virem, tělo nejprve produkuje IgM, poté velké množství IgG.
- Detekce IgM v krvi naznačuje nedávnou infekci, která se používá k včasné diagnostice infekce.
- IgG se produkuje pozdě a vydrží dlouhou dobu, používá se jako indikátor předchozí infekce.


**Detekce IgG / IgM pomáhá posoudit různé fáze virové infekce.**

## Zkušební metoda a interpretace výsledků


### Testovací metoda:




**1** Očistěte špičku prstu alkoholovým tamponem

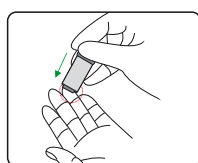


**2** Pomocí lancety propíchněte špičku prstu.

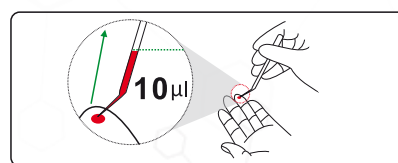


**3** Očistěte první kapku krve, stlačte špičku prstu a pomocí kapátka odeberte krev

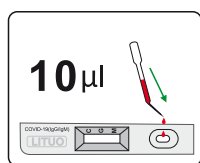

**4** Do jamky na vzorek přidejte 2 kapky krve

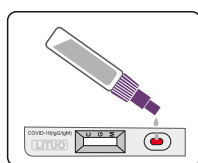


**5** Ihned přidejte 2 kapky ředidla

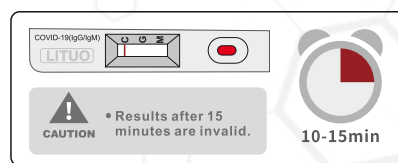

**6** Nechte 10 až 15 minut stát a sledujte výsledek.

### Interpretace výsledků:

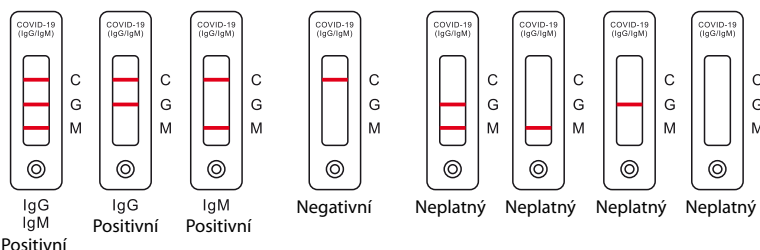

Positivní

IgG  
IgM

Positivní

IgG  
IgM

Positivní

IgG  
IgM

Positivní

Negativní

Neplatný

Neplatný

Neplatný

Neplatný

Neplatný

Neplatný

Neplatný

Neplatný

Neplatný

Neplatný

Neplatný

### Specifikace produktu:

Složení	Balení
Testovací karta	1 sada
Ředidla na vzorky 3ml/lahev	1 lahev
Návod k použití	1 sada

**UPOZORNĚNÍ:** Test je vhodné pečlivě přezkontrolovat po 20 min. od provedení. I méně výrazná slabá rýska T znamená pozitivitu testu.



ZHUHAI LITUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

Add : No.35, Yongan Three Road, Hongqi Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, China.

Tel.: +86 756 8639521 (Sales Center) FAX: +86 756 8639155 Email : market@lituo.com.cn



HUNAN LITUO BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: No. 129, Weiluo Road, Wangcheng Economic Development Zone, Changsha, Hunan, China.

Tel.: +86 731 82788178 Fax : +86 731 82789603 Email: market@lituo.com.cn

