

MEDICAL MONITOR


SESTAVA HUB K PŘENÁŠENÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT

Sestava HUB slouží pro přenos naměřených hodnot z jednotlivých měřících přístrojů (EKG, Oxymetr, Tlakoměr, Teploměr, Spirometr, Digitální váha, Glukometr apod.) do Národního dohledového centra společnosti MEDICAL MONITOR s.r.o.. Se sestavou zacházejte opatrně, ponechávejte ji na suchém místě.

OBSAH BALENÍ

- zařízení HUB (rozbočovač-přesměrovávání signálu)
- USB modem
- Bluetooth adaptér
- nabíječka

NÁKRES A KLÍČOVÉ FUNKCE SESTAVY

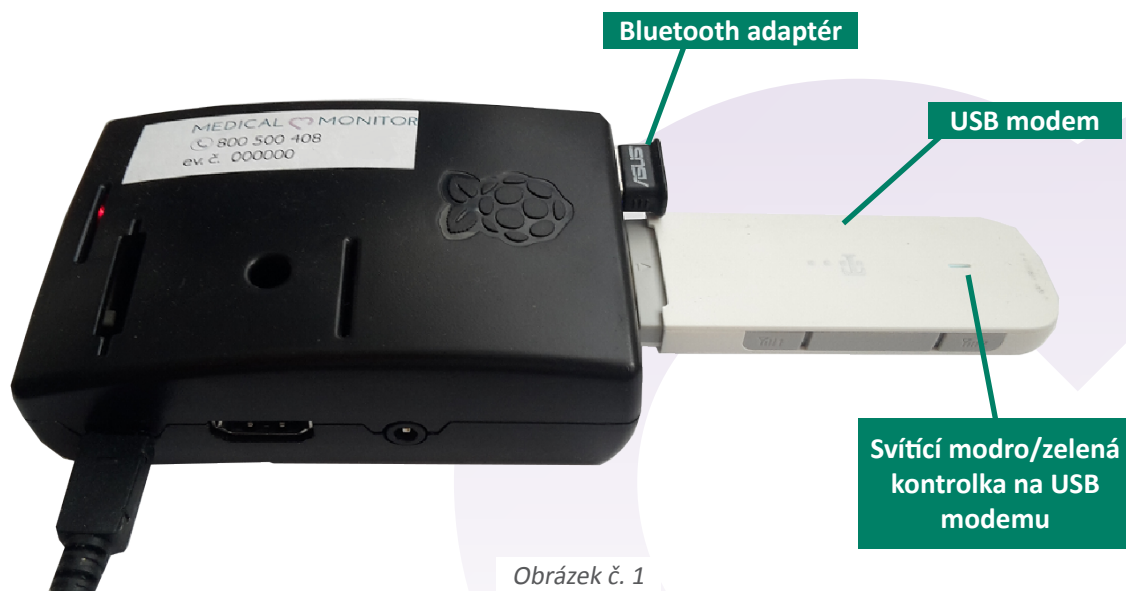

POPIS SPRÁVNÉHO PŘENÁŠENÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT

- 1 Zařízení-sestava HUB se Vám dostává do rukou sestavené a již připravené k použití, prosíme, nerozpojujte tuto sestavu.
- 2 Vezměte nabíječku a připojte ji k přístroji do otvoru k tomu určenému, viz obrázek 2 a zapojte do elektrické zásuvky.
- 3 Aby vždy docházelo ke správnému přenosu naměřených hodnot z jednotlivých měřících přístrojů, ponechtejte sestavu HUB neustále připojenou k elektrickému proudu.
- 4 Na bílém USB modemu se rozsvítí modré/zelené světýlko, viz Obrázek 1. To znamená, že je přístroj v pořádku a může dojít k přenosu naměřených hodnot.
- 5 Pokud by světýlko nesvítilo, nebo jen blikalo, odpojte, prosím, přístroj z elektrické zásuvky, chvíli vyčkejte a poté znovu zapojte.
- 6 Při měření se pohybujte v blízkosti sestavy HUB

OSTATNÍ INFORMACE K PŘÍSTROJI

BEZPLATNÁ LINKA

V případě nejasností nebo problému se sestavou HUB, kdy např. jen bliká nebo nesvítilo modré/zelené světýlko na USB modemu, i když jste postupovali dle návodu, kontaktujte naši BEZPLATNOU zelenou linku 800 500 408.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Měření provádějte vždy podle návodu, v poloze a v čase, který Vám doporučí lékař, volte pohodlný oděv, před použitím vždy kontrolujte čistotu přístroje a dbejte na osobní hygienu.

Veškeré informace, které mohou ovlivnit Vaše naměřené hodnoty (údaje o stravě, užitých medikamentech, fyzickém výkonu, stresových situacích aj.) zapisujte do Pacientského deníčku.

Pokud přístroj není v provozu, uchovejte jej v suchu, na tmavém místě a při pokojové teplotě.

MĚŘENÍ PROVÁDĚJTE VŽDY VE VZDÁLENOSTI MAXIMÁLNĚ 10 METRŮ OD ZAŘÍZENÍ HUB.